

# INSTRUÇÕES DE USO:

OTO-OFTALMOSCÓPIO VETERINÁRIO GOWLLANDS:- ref.3124



I - Fixe o cabeçote (2) ao cabo-porta pilhas (4), apertando o parafuso do mesmo.

II - Coloque duas pilhas tamanho médio ao INTERIOR do cabo-porta pilhas (4) apertando em seguida bem a tampa (5).

III - Escolha o espéculo (6) que vai usar; fixando-o ao cabeçote (2). Tome cuidado para não desalinhar a lâmpada(3).

IV - Para ligar o aparelho, gire o Regulador de Luminosidade (3) no sentido anti-horário

## IMPORTANTE:

**Não utilize nenhum produto químico para a limpeza das lentes, pois as mesmas são de acrílico.**



## ATENÇÃO

**Procure não deixar as pilhas dentro do cabo-porta pilhas quando não estiver em uso, afim de evitar danos ao aparelho.**

1 - Cabeçote

2 - Lupa

3 - Lâmpada

4 - Espéculos

5 - Regulador de Luminosidade

6 - Cabo-porta pilhas, Tamanho Médio

7 - Tampa do Porta-Pilhas

8 - Oftalmoscópio



# CERTIFICADO DE GARANTIA

O Otoscópio da marca GOWLLANDS, é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da venda.

Excetuam-se desta garantia os seguintes itens:

- Lâmpadas
- Quebras resultantes de acidentes
- Desgaste ou quebra por mau uso.

Esta garantia não abrange eventuais despesas com transporte do aparelho.

Nº \_\_\_\_\_ modelo **3124**

data de venda:- \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

nº da nota fiscal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Carimbo do Revendedor

Produto Importado por:



Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Três, 23 - Cond. Wetspark Ind. - Jd. Emicol  
Itu - SP  
Fone 11 4862.0072  
e-mail: sac@dorja.com.br  
www.dorja.com.br  
CNPJ 50.208.271/0001-05

Responsável Técnico: Ricardo Nardelli Escobosa  
CREA-SP 0601694023