

Defeitos	Vazamento de ar	Vazamento no manômetro	Vazamento na Pera.	Vazamento no Manguito	Vazamento no manômetro até a Assistência Técnica para correção
	Porteiro fora do zero (mais que 3 mmHg)	Queda Forte Descalibração	Enviar o manômetro até a Assistência Técnica para correção	Enviar o manômetro até a Assistência Técnica para correção	Enviar o manômetro até a Assistência Técnica para correção
Possíveis Causas					
S o l u ç õ e s					

EXPLICATIVO:

Funcionamento: A bragaçadeira é colocada em torno do braço sendo fechada através de fecho próprio. Após a bragaçadeira manual demonstrada para, a bragaçadeira será insuflada até que a pressão aplicada à mesma interrompa a passagem do sangue no braço. Inicia-se então o esvaziamento gradativo da bragaçadeira através de uma válvula. Com auxílio de um estetoscópio deve-se auscultar a artéria braquial, na junção do braço com o antebraço. A primeira batida cardíaca auscultada é a pressão sistólica (popularmente conhecida como pressão máxima), e a última auscultada indica a pressão diastólica (popularmente conhecida como pressão mínima).

Uso do equipamento: Aparelho específico para medir pressão arterial.

Operação de equipamento: Este equipamento dispensa treinamento para uso, pois é destinado a profissionais com conhecimento prévio em escolas profissionalizantes. Ex: Medicina, Enfermagem, etc...

Posicionamento da Bragaçadeira: Nossa bragaçadeira tem uma identificação do posicionamento da bragaçadeira sobre a ARTÉRIA (sendo que esta seta indica a correta colocação da bragaçadeira sobre a artéria braquial.

Manutenção: A limpeza do aparelho deve ser feita com tecido suave, imediate com água (não utilizar produtos químicos agressivos) A esterilização não deve ultrapassar 60°C.

Consequências do mau uso: Qualquer manutenção deverá ser enviada para a Assistência Técnica.

O mau uso do equipamento poderá provocar sérios riscos na interpretação da leitura da pressão arterial.

MANUAL DO USUÁRIO

ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE MEDICATE

Este aparelho Medicate foi verificado conforme Portaria número 153/2005 do INMETRO. Esta portaria define que todo esfigmomanômetro deve ser verificado anualmente por um órgão competente designado pelo INMETRO.

A GARANTIA NÃO INCLUI A VERIFICAÇÃO ANUAL PELO INMETRO.

Manômetro: Conforme indicado no Manômetro, a unidade de medição é milímetro de mercúrio (mmHg). Cada divisão corresponde a 2 mmHg e é permitido um erro no ponto Zero de 3 mmHg.

Bragaçadeira Tipo: Velcro Botão

Portaria Inmetro 118/2002

TAMANHO

Adulto

CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO 22 a 28 cm



Certificado de Garantia

A obrigação da **DORJA** nos termos desta garantia consiste na substituição ou reparo de peças defeituosas, desde que o aparelho seja remetido ao seu estabelecimento diretamente ou através de revendedor autorizado.

A **DORJA** restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A **DORJA** não se responsabiliza por danos, consequências a pessoas ou a coisas em decorrência do uso do aparelho.

A **DORJA** declara nula e sem efeito a garantia se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, uso em desacordo com o manual de instruções ou no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas.

Também será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações. Fim do prazo estabelecido para esta garantia, e somente até (12 meses manômetro) e a (06 meses demais componentes) a contar deste momento, a **DORJA** se compromete à substituição e reparo das peças defeituosas, mediante pagamento de acordo com os preços que estiverem em vigor.

A **DORJA** obriga-se a prestar os serviços acima referidos tanto os gratuitos como os remunerados, sendo o proprietário, sempre o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho.

NOTA: Esta garantia será válida se este termo for devidamente preenchido pela **DORJA** ou pelo revendedor autorizado no ato da aquisição. É necessário, ainda, que este termo, juntamente com a nota fiscal de venda, seja apresentado no instante da reclamação.

Rev 10/2017

Esfigmomanômetro

Manual do Usuário

Esfigmomanômetro

Ref. MD 30

medicate

Esfigmomanômetro Aneroide

Certificado de Garantia

A **Dorja**, assegura ao proprietário deste esfigmomanômetro marca **MEDICATE**, a garantia contra qualquer defeito de material e fabricação que nele se apresentar, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador comprovada pela apresentação da nota fiscal da Dorja ou de revendedor autorizado no prazo de:

MANÔMETRO: 12 MESES
DEMAIS COMPONENTES: 06 MESES

A garantia não inclui a verificação anual conforme Portaria do INMETRO 46/2016.

_____/_____/_____
Data

Carimbo e assinatura do revendedor autorizado

Fabricado e Distribuído por:

dorja

Dorja - Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda
Rua Tres, 23 - Cond. Westpark Emp. • Jardim Emicoli
Itu • SP • Cep. 13.312-823 • Fone: 11 4862.0072
e-mail: sac@dorja.com.br • www.dorja.com.br
CNPJ 50.208.271/0001-05 • Indústria Brasileira

Assistência Técnica: N° Registro Ministério Saúde
Consulte nossa rede de 10332170031
assistência técnica em Responsável Técnico:
anexo ou consulte nosso Eng. Ricardo Nardelli Escobosa
site: www.dorja.com.br CREA. 06016940

Fabricado por: Wenzhou Hongshun Industries & Trade Co.Ltd.
China