


# INSTRUÇÕES DE USO:

OTOSCÓPIO VETERINÁRIO GOWLLANDS:- ref.3123

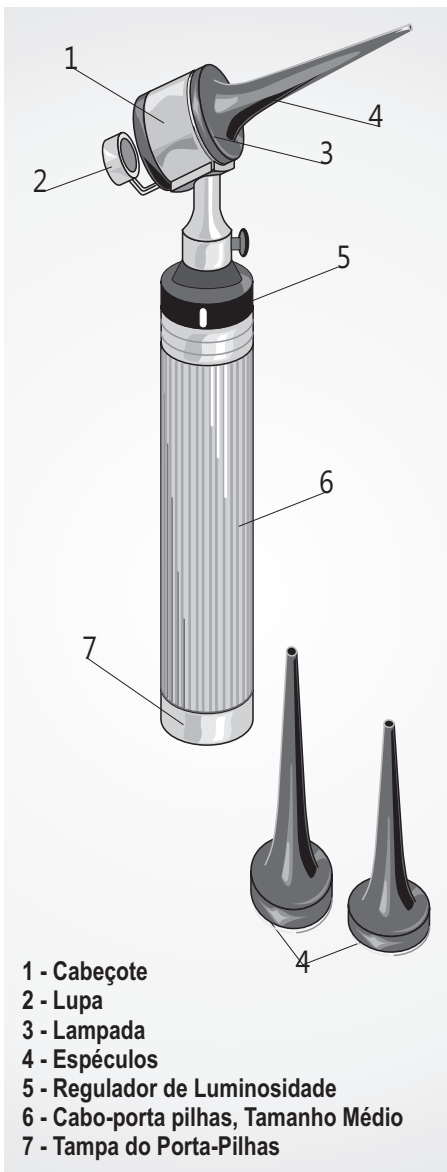

I - Fixe o cabeçote (1) ao cabo-porta pilhas(6), apertando o parafuso do mesmo.

II - Coloque duas pilhas tamanho médio ao INTERIOR do cabo-porta pilhas(6) apertando em seguida bem a tampa(7).

III - Escolha o espéculo(4) que vai usar, fixando-o ao cabeçote(1). Tome cuidado para não desalinhar a lampada(3).

IV - Para ligar o aparelho, gire o Regulador de Luminosidade(5) no sentido anti-horário

## IMPORTANTE:

Não utilize nenhum produto químico para a limpeza das lentes, pois as mesmas são de acrílico.



## ATENÇÃO

Procure não deixar as pilhas dentro do cabo-porta pilhas quando não estiver em uso, afim de evitar danos ao aparelho.

- 1 - Cabeçote
- 2 - Lupa
- 3 - Lampada
- 4 - Espéculos
- 5 - Regulador de Luminosidade
- 6 - Cabo-porta pilhas, Tamanho Médio
- 7 - Tampa do Porta-Pilhas



# CERTIFICADO DE GARANTIA

O Otopscópio da marca GOWLLANDS, é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 ( doze ) meses, a contar da data da venda.

Excetuam-se desta garantia os seguintes itens:

- Lâmpadas
- Quebras resultantes de acidentes
- Desgaste ou quebra por mau uso.

Esta garantia não abrange eventuais despesas com transporte do aparelho.

Nº \_\_\_\_\_ modelo **3123**

data de venda:- \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

nº da nota fiscal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Carimbo do Revendedor

Produto Importado por:

Rua Três, 23 - Cond. Wetspark Ind. - Jd. Emicol

Itu - SP.

Fone 11 4862.0072

e-mail: sac@dorja.com.br

www.dorja.com.br

CNPJ 50.208.271/0001-05



Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.

Responsável Técnico: Ricardo Nardelli Escobosa  
CREA-SP 0601694023