


Sobre seu medidor de pico de fluxo:
O seu Medidor de Pico de Fluxo Medicate irá ajudar a monitorar sua asma medindo sua Taxa de Pico de Fluxo Expiratório (PFE). Ele deve ser usado em conjunto com seu Médico ou Enfermeira.

Desempenho: Precisão <+- 10% (W-M); <5% (ATS)
Repetividade: <+-2% (Intra-instrumento)
Resistência Máx. do Fluxo: 0.30 KPa/l/s@c550l/min

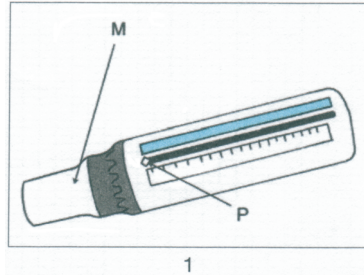


Insira o bocal (M) no medidor e mova o ponteiro (P) para o zero no final da abertura.

INSTRUÇÕES DE USO E CERTIFICADO DE GARANTIA




2

Fique de pé ou sente-se eretamente, inspire profundamente e coloque o bocal na boca, vedando com os lábios. Assopre dentro do medidor o mais rápido e forte que puder. Não coloque sua língua no bocal do medidor. Não aja de forma que propicie cuspe ou tosse para dentro do aparelho, isso poderá causar uma falsa leitura do medidor.

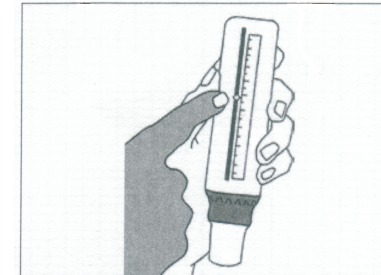

3

Retire o medidor da boca e observe o número no lado oposto ao ponteiro. Seu PFE será o mais alto de três tentativas. Repita o procedimento mais duas vezes e observe o número em cada uma delas. Anote o número mais alto das três tentativas na tabela no verso.

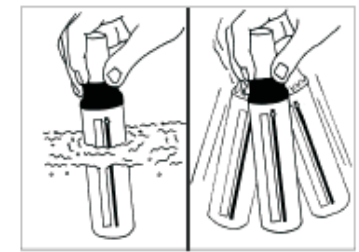

LIMPEZA: Seu medidor deverá ser limpo de tempos em tempos. Mergulhe o medidor numa solução de detergente suave e água morna por 2-3 minutos e agite. Enxágue em água morna, agite para tirar o excesso da água e deixe secar em um local seco. **NÃO MERGULHE O MEDIDOR EM ÁGUA FERVENTE.**

CUIDANDO DO SEU PEAK FLOW:

Mantenha o medidor em um local seco e limpo e não o exponha ao calor excessivo. O bocal removível deverá ser limpo regularmente em uma suave solução desinfetante. Temperaturas extremas, altitude ou umidade podem afetar o desempenho do medidor.

PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO		PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO		PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO		PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO	
850	800	850	800	850	800	850	800
750	700	750	700	750	700	750	700
650	600	650	600	650	600	650	600
550	500	550	500	550	500	550	500
450	400	450	400	450	400	450	400
350	300	350	300	350	300	350	300
250	200	250	200	250	200	250	200
150	100	150	100	150	100	150	100
50	0	50	0	50	0	50	0
segunda	terça	segunda	terça	segunda	terça	segunda	terça
quarta	quinta	quarta	quinta	quarta	quinta	quarta	quinta
sexta	sábado	sexta	sábado	sexta	sábado	sexta	sábado
domingo		domingo		domingo		domingo	

Você deverá registrar seu PFE duas vezes ao dia conforme orientações do seu médico ou enfermeira. Marque seu PFE na tabela (acima) todos os dias e escreva a data. Junte os pontos como mostrado. Lembre-se que apenas o mais alto ponto das três tentativas deverá ser marcado. Seu médico precisará examinar sua tabela PFE periodicamente.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Os produtos FYNE DYNAMICS, importados por Dorja Ind. e Com. de Equip. Méd. Lda, são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de venda.

Excetua-se desta garantia os seguintes itens: quebras resultantes de acidentes ou por uso inadequado.

Esta garantia não abrange eventuais despesas com transporte deaparelho.

Nº _____
Data de venda: ___/___/_____
nº da nota fiscal _____

Carimbo do revendedor

Fabricado por:
Fyne Dynamics Ltd - 1 Horsecroft Place
Pinnacles - Harlow, Essex UK

Importado por:



Dorja - Ind.e Com.de Equip.Médicos Ltda
Rua Tres, 23 • Cond.Westpark Incl. • Jardim Emic ol
Itu • SP • Cep. 13312-823
e-mail: sac@dorja.com.br • www.dorja.com.br
CNPJ 50.208.271/0001-05
Registro Anvisa: 10332170038

Responsável Técnico:
Ricardo Nardelli Escobosa
CREA-SP 0601694023

Este manual não poderá ser copiado ou usado sem prévia autorização por escrito de Dorja - Ind.e Comercio de Equipamentos Médicos Ltda.