

medicate[®]

Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático de BRAÇO



DBP-1319



Insuflação e desinsuflação automáticas



Detecção de pulsação irregular



120 memórias em 2 grupos



Medição rápida



Média dos últimos 3 testes



Detecção de bateria fraca



Mecanismo de insuflação silencioso



Desligamento automático



Acompanha estojo para transporte e pilhas



**Tela ampla com
números grandes
Melhor visualização**

Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático de Braço



2 grupos de memória




Confiabilidade



Resultado preciso



Fácil de usar

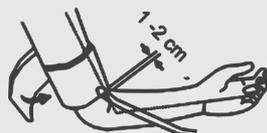

1. Fixe a braçadeira cerca de 1-2 cm acima da articulação do cotovelo. Para obter melhores resultados, remova qualquer tecido ou roupa do braço e o mantenha ao nível do coração durante o teste.



2. Segure pressionado o botão "START / STOP" até escutar um sinal sonoro de "bip". A tela LCD aparecerá por um segundo enquanto a unidade realiza um diagnóstico rápido. Um tom longo indica que o dispositivo está pronto para o teste.



3. O modo de verificação de memória pode ser acessado pressionando o botão "M".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição do produto	Monitor de Pressão Arterial Automático de Braço	
Modelo	DBP-1319	
Tela	LCD Digital Display	
Método de medição	Oscilométrico	
Faixa de medição	Pressão sistólica	60mmHg~260 mmHg
	Pressão diastólica	30mmHg~200 mmHg
	Pressão	0mmHg~300 mmHg
	Erro máx. Pressão	±3mmHg
	Frequência cardíaca (pulso)	30 ~ 180 Batidas/Minuto
	Erro máx. Pulsação	±5%
Pressurização (insuflação)	Automática	
Esvaziamento	Válvula de liberação de Pressão Automática	
Memória	120 Memórias em 2 grupos com data e hora	
Funções	Detecção de pulsação irregular	
	Indicador de classificação de risco da OMS	
	Média dos últimos 3 testes	
	Detecção de bateria fraca	
	Desligamento Automático	
Garantia	24 meses	
Alimentação	4 pilhas AA (inclusas)	
Peso	Aproximadamente 480g (sem pilhas)	
Circunferência da braçadeira	22-36 cm	

Embalagem contém:

- 01 Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático
- 01 Braçadeira Adulto livre de látex
- 01 Estojo para transporte
- 04 pilhas AA
- 01 Manual de instruções

Registro na ANVISA: N° 10332179008

Responsável Técnico: Ricardo Nardelli Escobosa
CREA 060.169.402.3 - SP | Validade indeterminada



DORJA Ind. e Com. de Equipamentos Médicos Ltda.
Itu - SP - CNPJ 50.208.271/0001-05
www.dorja.com.br