


## ESTETOSCÓPIOS MEDICATE

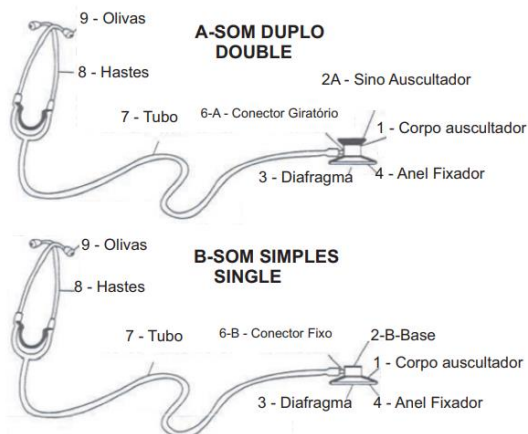

Produzido com tecnologia altamente desenvolvida, e materiais da mais alta qualidade resultam em um aparelho de extrema precisão.

Rev 09/24

Manual do Usuário

Estetoscópios

medicate

### Explicativo

#### Funcionamento:

Encaixar as olivas ( item 9 ) , nos ouvidos de modo que fiquem bem confortáveis. Colocar o diafragma (item 3 ) , em contato com a região do corpo que se deseja auscultar. (obs.: O diafragma reproduz sons de frequência entre 100 e 1500 Hz, porém com alta fidelidade. Identificação precisa de sons como por exemplo batimentos cardíacos ). O estetoscópio som duplo possui dois lados auscultadores: **primeiro lado**, diafragma ( vide instruções acima ), **segundo lado**, sino auscultador (item 2-A). Encostar o sino auscultador, na região do corpo que se deseja auscultar. Este reproduz sons de frequência 10 e 100 Hz.

#### Uso do Equipamento:

Aparelho específico para auscultação de sons humanos, exemplo sopro cardíacos, respiração, etc..

#### Operação do Equipamento:

Este equipamento dispensa treinamento para uso, pois é destinado a profissionais com conhecimento prévio em escolas profissionalizantes, exemplo: Medicina, Enfermagem, entre outros.

#### Manutenção:

Qualquer manutenção deverá ser enviada para a rede de Assistência Técnica.

Importado e Distribuído por:

Dorja - Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda  
Rua Marcos Max Guerra Davila, 23 -  
Westpark Empresarial  
Itu - SP - Cep. 13312-703  
e-mail: [sac@dorja.com.br](mailto:sac@dorja.com.br) - [www.dorja.com.br](http://www.dorja.com.br)  
CNPJ 50.208.271/0001-05 • Indústria  
Brasilera

Fabricado:  
Honsun (Nantong) Co.Ltd.  
China

Assistência Técnica:  
Consulte nossa rede de assistência técnica em anexo  
ou consulte nosso site: [www.dorja.com.br](http://www.dorja.com.br)

Nº ANVISA: 10332170029  
Responsável: Eng. Ricardo Nardelli Escobosa  
CREA 0601694023

### Certificado de Garantia

A obrigação da **DORJA** nos termos desta garantia consiste na substituição ou reparo de peças defeituosas, desde que o aparelho seja remetido ao seu estabelecimento diretamente através de revendedor autorizado.

A **DORJA** restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A **DORJA** não se responsabiliza por danos consequencias a pessoas ou a coisas em decorrência do uso do aparelho.

A **DORJA** declara nula e sem efeito a garantia se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, uso em desacordo com o manual de instruções ou no caso de apresentar sinais de violação, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas.

Também será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações. Findo o prazo estabelecido para esta garantia, e somente até 12 (doze) meses a contar deste momento, a **DORJA** se compromete à substituição e reparo das peças defeituosas, mediante pagamento de acordo com os preços que estiverem em vigor.

A **DORJA** obriga-se a prestar os serviços acima referidos tanto os gratuitos como os remunerados, sendo o proprietário, sempre o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho.

**NOTA:-** Esta garantia será válida se este termo for devidamente preenchido pela **DORJA** ou pelo revendedor autorizado no ato da aquisição. É necessário, ainda, que este termo, juntamente com a nota fiscal de venda, seja apresentado no instante da reclamação.

ESTETOSCÓPIO SIMPLES MEDICATE: 12 MESES  
ESTETOSCÓPIO DUPLO MEDICATE: 12 MESES

Carimbo e assinatura do revendedor \_\_\_\_\_  
Data / / \_\_\_\_\_

A Dorja, assegura ao proprietário deste estetoscópio, garantia contra qualquer defeito de material e fabricação que nele se apresentar, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador comprovada pela apresentação da nota fiscal Dorja ou de revendedor autorizado no prazo de:

Certificado de Garantia