

Posicionamento dos pés de borracha conforme utilização:

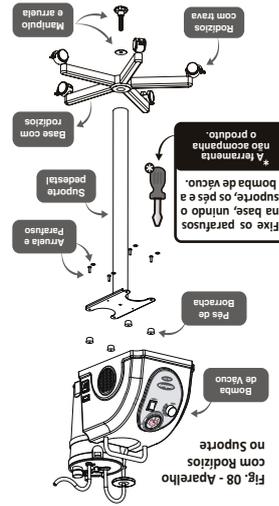


Fig. 08 - Aparelho com Rodízios no Suporte

- Se necessário instalar o suporte pedestal, siga as orientações abaixo.
- Posicione a base com rodízios na parte inferior do pedestal;
- Rosqueie o manípulo com a arruela de ferro para fixar a base junto ao pedestal;
- Remova os pés de borracha do aparelho e posicione sobre os furos do suporte pedestal;
- Posicione a bomba de vácuo sobre os pés de borracha e fixe utilizando os parafusos e arruelas de pressão, ver detalhes na figura 8.

IMPORTANTE: Quando o seu equipamento permanecer em lugares com inclinações maiores que 5°.

* Realizando instalação do suporte com rodízios

Nº Anvisa: 10332170037
 Responsável Técnico
 Eng. Ricardo Nardelli Escobosa
 CREA. 0601694023

Fabricada e Distribuída por:
 Dorja - Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda
 Rua Marcos Max Guerra D'Avila, 23 - Westpark Empresarial
 Itu - SP - Cep. 13312-703
 e-mail: sac@dorja.com.br • www.dorja.com.br
 CNPJ 50.208.271/0001-05 • Indústria Brasileira



Ref.: MD 300

para Aspirador 3 litros

Guia rápido para instalação do pedestal



* Realizando instalação do suporte com rodízios


Se necessário instalar o suporte pedestal, siga as orientações abaixo.

- Posicione a base com rodízios na parte inferior do pedestal;
- Rosqueie o manípulo com a arruela de ferro para fixar a base junto ao pedestal;
- Remova os pés de borracha do aparelho e posicione sobre os furos do suporte pedestal;
- Posicione a bomba de vácuo sobre os pés de borracha e fixe utilizando os parafusos e arruelas de pressão, ver detalhes na figura 8.

IMPORTANTE: Quando o seu equipamento estiver na opção com rodízios ele não deve permanecer em lugares com inclinações maiores que 5°.



Posicionamento dos pés de borracha conforme utilização:

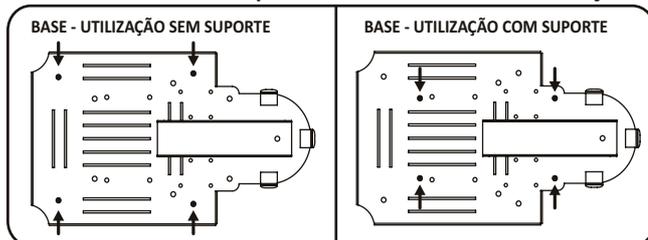

Guia rápido para instalação do pedestal

para Aspirador 3 litros

Ref.: MD 300



Fabricada e Distribuída por:
 Dorja - Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda
 Rua Marcos Max Guerra D'Avila, 23 - Westpark Empresarial
 Itu - SP - Cep. 13312-703
 e-mail: sac@dorja.com.br • www.dorja.com.br
 CNPJ 50.208.271/0001-05 • Indústria Brasileira